

VITA VMK Master®

Pro kompletní fazetování kovových konstrukcí v rámci běžného rozsahu hodnot koeficientu tepelné roztažnosti



VITA určení barvy


VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

Platí od 10.09

VITA SYSTEM

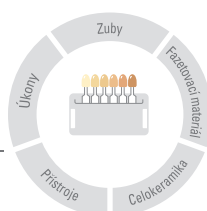

3D-MASTER

VITA

Popis výrobku

VITA VMK Master je živcová fazetovací keramika pro kovové konstrukce v běžném rozsahu hodnot koeficientu tepelné roztažnosti ze slitin s vysokým i sníženým obsahem zlata jakož i ze slitin na bázi paladia. Na základě svých chemickofyzikálních vlastností a teploty vypalování se hodí zejména pro fazetování konstrukcí z neušlechtilých slitin.

Výhody

- materiál, který není žádným kompromisem mezi bezpečností a estetikou
- vylepšený proces výroby "Master proces" (materiálová stabilizace pro efektivní reprodukci) pro špičkové vlastnosti pro pracování, jako např. zlepšená schopnost modelování, minimální srážlivost
- všeobecně známé schéma vrstev dentin - řezná hrana
- bohatý sortiment přídatných hmot pro individualizaci
- vysoce estetické restaurace díky brilantním barvám
- k dostání v barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER a VITAPAN classical

VITA VMK Master® Sortiment – barvy VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master STANDARD SET 3D-MASTER

Standardní sortiment pro reprodukci barev 3D-MASTER.

výr. č. BVMKSET3D*/**

Kus	Obsah	Materiál
1	12 g	WASH OPAQUE WO
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
26	12 g	OPAQUE DENTINE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
2	12 g	ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	–	Barevný indikátor 3D-MASTER
1	–	VITA Linearguide 3D-MASTER
–	–	Příslušenství
1	–	Návod na zpracování

* v následujících barvách k dostání i jako 10 COLOR SET (výr. č. BVMK10S3D):
(1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2)

** k dostání vždy i s PASTE OPAQUE (výr. č. BVMKSETP3D / výr. č. BVMK10SP3D)



VITA VMK Master STARTER SET 3D-MASTER (2M2, 3M2)

Dvoubarevný sortiment

výr. č. BVMKSS3D*

Kus	Obsah	Materiál
2	12 g	OPAQUE OP2, OP3
2	12 g	OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
2	–	Týčinky barevných vzorů 2M2, 3M2
1	–	Návod na zpracování

* k dostání i s PASTE OPAQUE (výr. č. BVMKSSP3D)



VITA VMK Master BLEACHED COLOR SET 3D-MASTER*

Velmi světlé barvy pro reprodukci bílých zubů

výr. č. BVMKBSC

Kus	Obsah	Materiál
1	12 g	OPAQUE OPO
3	12 g	OPAQUE DENTINE OM1-OM3
3	12 g	DENTINE OM1-OM3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	–	BLEACHED SHADE GUIDE OM1-OM3
1	–	Návod na zpracování

* k dostání i s PASTE OPAQUE (výr. č. BVMKBSCP)

VITA VMK Master® Sortiment – barvy VITAPAN® classical A1-D4



VITA VMK Master STANDARD SET classical

Standardní sortiment pro reprodukci barev

VITAPAN classical A1 - D4.

výr. č. BVMKSETC*

Kus	Obsah	Materiál
1	12 g	WASH OPAQUE WO
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	OPAQUE DENTINE A1-D4
16	12 g	DENTINE A1-D4
2	12 g	ENAMEL EN1, EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	–	Barevný indikátor VITAPAN classical
1	–	Barevná stupnice VITAPAN classical
–	–	Příslušenství
1	–	Návod na zpracování

* k dostání i s PASTE OPAQUE (výr. č. BVMKSETPC)



VITA VMK Master STARTER SET (A2, A3)

Dvoubarevný sortiment

výr. č. BVMKSSC*

Kus	Obsah	Materiál
2	12 g	OPAQUE A2, A3
2	12 g	OPAQUE DENTINE A2, A3
2	12 g	DENTINE A2, A3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
2	–	Tyčinky barevných vzorů A2, A3
1	–	Návod na zpracování

* k dostání i s PASTE OPAQUE (výr. č. BVMKSSCP)



VITA VMK Master ADDITIONAL SET

Pro vytváření přirozených efektů a charakteristik
výr. č. BVMKAS

Kus	Obsah	Materiál
8	12 g	TRANSLUCENT T1-T8
8	12 g	DENTINE MODIFIER DM1-DM8
6	12 g	LUMINARY LM1-LM6
6	12 g	MARGIN MN, M1-M5
1	12 g	OPAL TRANSLUCENT OT1
1	12 g	PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	–	Lišta se vzorníkem barev TRANSLUCENT
1	–	Lišta se vzorníkem barev DENTINE MODIFIER/ LUMINARY
1	–	Lišta se vzorníkem barev MARGIN/GINGIVA



VITA VMK Master GINGIVA SET

Přirozeně působící zubní dásně
výr. č. BVMKGS*

Kus	Obsah	Materiál
5	12 g	GINGIVA G1-G5
2	12 g	GÖL, GÖD
1	–	Lišta se vzorníkem barev MARGIN/GINGIVA

* k dostání i s PASTE OPAQUE (výr. č. BVMKGS)



VITA systém stavebnicové boxu

Veškeré výrobky řady VITA VMK Master se distribuují v kvalitních lepenkových krabicích.

VITA stavebnicový box si můžete na přání (za poplatek) přiojednat.

Kompletní box č. 2 se dvěma zásuvkami (lze použít pro VITA VMK Master Standard Set, 10 Color Set): výr. č.: ZMBK2

Kompletní box č. 1 se zásuvkou (lze použít pro VITA VMK Master Additional Set): výr. č. ZMBK1



Tiskoviny / Média

Titul	Popis	Obj. č.
VITA VMK Master	Návod na zpracování	1645T
VITA VMK Master	Informační prospekt o výrobku	1651T
VITA VMK Master	List s údaji o výrobku	1693T
VITA VMK Master	Kolečko kombinací	1659M
VITA VMK Master	Objednávkový formulář 3D-MASTER	1654M*
VITA VMK Master	Objednávkový formulář classical	1655M*

* ke stažení na stránkách www.vita-zahnfabrik.com

VITA VMK Master® Přiřazovací tabulka pro VITA SYSTEM 3D-MASTER® a VITAPAN® classical

Barvy VITA SYSTEM 3D-MASTER	OPAQUE	MARGIN	LUMINARY	NECK	CERVICAL	ENAMEL
0M1	OP0	M1	LM1	–	–	EN1
0M2	OP0	M1	LM1	–	–	EN1
0M3	OP0	M1/M2*	LM1/LM2*	–	–	EN1
1M1	OP1	MN/M2*	LM1/LM2*	N1	CE1	EN1
1M2	OP1	M1/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN1
2L1.5	OP2	MN/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN1
2L2.5	OP2	M2/M3*	LM1/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
2M1	OP2	MN/M2*	LM2	N1	CE1	EN1
2M2	OP2	M2/M3*	LM2/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
2M3	OP2	M3	LM2/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
2R1.5	OP2	M2/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN1
2R2.5	OP2	M3	LM2/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
3L1.5	OP3	M2/M5*	LM2/LM6*	N1/N5*	CE2	EN1
3L2.5	OP3	M3/M5*	LM3/LM6*	N1/N3*	CE2/CE3*	EN1
3M1	OP3	M1/M5*	LM2	N1/N5*	CE2	EN1
3M2	OP3	MN/M5*	LM2/LM3*	N2	CE1/CE3*	EN1
3M3	OP3	M3/M5*	LM3	N2/N3*	CE2/CE3*	EN1
3R1.5	OP3	MN/M5*	LM2	N1/N5*	CE2	EN1
3R2.5	OP3	M3/M5*	LM3/LM6*	N2/N3*	CE1/CE3*	EN3
4L1.5	OP4	M5	LM2/LM6*	N1/N5*	CE2	EN1
4L2.5	OP4	M3/M5*	LM3/LM5*	N3	CE1/CE3*	EN1
4M1	OP4	M2/M5*	LM6	N1/N5*	CE2	EN1
4M2	OP4	M5	LM2/LM5*	N1/N5*	CE1/CE3*	EN3
4M3	OP4	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N4*	CE3	EN3
4R1.5	OP4	M2/M5*	LM2/LM5*	N1/N5*	CE2	EN1
4R2.5	OP4	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N4*	CE1/CE3*	EN3
5M1	OP5	M5	LM5/LM6*	N1/N5*	CE1/CE3*	EN1
5M2	OP5	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N5*	CE2/CE3*	EN3
5M3	OP5	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N4*	CE3	EN3

Barvy VITAPAN classical A1-D4	OPAQUE	MARGIN	LUMINARY	NECK	CERVICAL	ENAMEL
A1	OP A1	M1/M3*	LM2	N1	CE1	EN1
A2	OP A2	MN/M3*	LM2	N1/N2*	CE1/CE2*	EN1
A3	OP A3	M3	LM3/LM6*	N1/N3*	CE2	EN1
A3,5	OP A3,5	M3/M5*	LM3/LM6*	N3	CE1/CE3*	EN2
A4	OP A4	MN/M5*	LM2/LM5*	N1/N5*	CE3	EN2
B1	OP B1	MN/M2*	LM1/LM2*	N1	CE1	EN2
B2	OP B2	M2/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN2
B3	OP B3	M3	LM3/LM6*	N1/N2*	CE2	EN2
B4	OP B4	M3	LM3/LM6*	N1/N3*	CE2/CE3*	EN2
C1	OP C1	MN/M2*	LM2	N1	CE1	EN2
C2	OP C2	M2/M5*	LM2/LM6*	N1/N5*	CE1	EN2
C3	OP C3	M2/M5*	LM6	N1/N5*	CE1/CE2*	EN1
C4	OP C4	M5	LM5/LM6*	N5	CE3	EN1
D2	OP D2	M2/M5*	LM2/LM6*	N1/N5*	CE1/CE2*	EN2
D3	OP D3	M3/M5*	LM6	N1/N5*	CE2	EN2
D4	OP D4	M2/M3*	LM3/LM6*	N1/N5*	CE2/CE3*	EN2

Přiřazené hodnoty slouží pouze pro orientaci!

* Poměr směsí 1:1

VITA VMK Master® Přídavné hmoty –
použitelné pro VITA SYSTEM 3D-MASTER® a VITAPAN® classical

Popis	Popis	výr. č. 12 g
-------	-------	--------------

VITA VMK Master WASH OPAQUE

WO	zlatě oranžová	B4825912
----	----------------	----------

VITA VMK Master NECK

N1	běžová	B4824112
N2	žlutá	B4824212
N3	žlutě oranžová	B4824312
N4	oranžová	B4824412
N5	khaki	B4824512

VITA VMK Master ENAMEL

EN1	bělavá	B4819112
EN2	žlutavá neutrální	B4819212
EN3	červenavá	B4819312

VITA VMK Master WINDOW

WIN	průsvitná	B4818112
-----	-----------	----------

VITA VMK Master TRANSLUCENT

T1	bělavá	B4809112
T2	žlutavě hnědá	B4809212
T3	růžová	B4809312
T4	neutrální	B4809412
T5	světle modrá	B4809512
T6	modrá	B4809612
T7	šedá	B4809712
T8	červenavá	B4809812

VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT

OT1	neutrální	B4817112
-----	-----------	----------

VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT

PLT1	perleťová krémová	B4815112
------	-------------------	----------

VITA VMK Master CERVICAL

CE1	světle žlutá	B4820112
CE2	světle oranžová	B4820212
CE3	zlatě žlutá	B4820312

Popis	Popis	výr. č. 12 g
-------	-------	--------------

VITA VMK Master DENTINE MODIFIER

DM1	bílá	B4812112
DM2	krémová	B4812212
DM3	žlutá	B4812312
DM4	oranžová	B4812412
DM5	červenavá	B4812512
DM6	hnědavě červenavá	B4812612
DM7	khaki	B4812712
DM8	šedá	B4812812

VITA VMK Master MARGIN

MN	neutrální	B4826012
M1	bílá	B4826112
M2	běžová	B4826212
M3	žlutá	B4826312
M4	oranžově červenavá	B4826412
M5	světle hnědá	B4826512

VITA VMK Master LUMINARY

LM1	bílá	B4814112
LM2	písková	B4814212
LM3	žlutá	B4814312
LM4	světlá hnědě oranžová	B4814412
LM5	světle hnědá	B4814512
LM6	světlá khaki	B4814612

VITA VMK Master GINGIVA

G1	starorůžová	B4823112
G2	oranžově růžová	B4823212
G3	růžově červená	B4823312
G4	hnědě červená	B4823412
G5	černočervená	B4823512
GOL	světlá	B4827112
GOD	tmavá	B4827312

VITA VMK Master CORRECTIVE

COR1	neutrální	B4822112
COR2	běžová	B4822212